



オプティカントを始めよう

Opti Canto®の特徴

様々なインソールがある中、Opti Canto はカカト部分のみの形状を採用してます。その形状ゆえ、靴を選ばずにご使用いただけます。靴に接着をせずともずれることはない為、靴が変わっても安心です。例えば、外靴から中靴へ、中靴から外靴へ入れ替え可能なので、1 日中 Opti Canto の効果を実感して頂けます。

そして最大の特徴が、斜めに傾いているということです。この傾きをその人その人に合わせてカスタマイズすることにより、あなただけのオーダーメイドインヒールが出来上がります。3 色とも傾きが異なる為、様々な組み合わせが可能です。

ではまず、あなたの股関節を測定しましょう。



STANCER®測定




まず基本情報の入力をします。

立位にて股関節の外旋・内旋の最大角度を測定します。

測定値をもとに推奨オプティカント、重心位置、運動特性、ワンポイントアドバイスが表示されます。


短時間のうちに立位荷重時の股関節回旋角度を測定できることは STANCER の大きな特徴の一つです。

測定画面

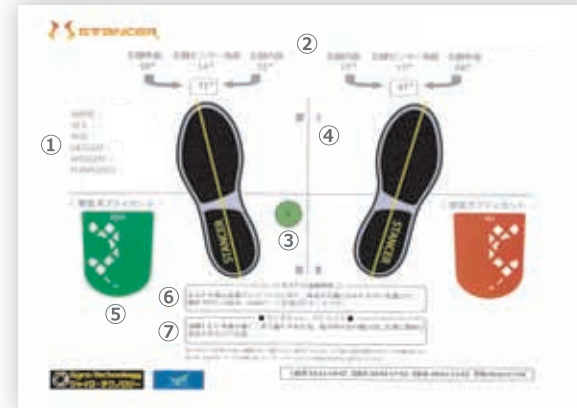

- ①基礎データ：【NAME/ 氏名】
【SEX/ 性別】
【AGE/ 年齢】
【HEIGHT/ 身長】
【WEIGHT/ 体重】
【PURPOSES/ 競技種目】
- ②外旋角度：つま先を外側に向けた時の股関節の回旋角度。
センター角度：自然立位時のつま先角度。
内旋角度：つま先を内側に向けた時の股関節の回旋角度。
- ③重心ポイント：測定結果から割り出された重心位置の真下を表す。
- ④ゾーン：右前を「Ⅰ」とし、時計回りで「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」と表記します。
- ⑤推奨オプティカント
あなたの股関節に最適なオプティカントの組み合わせを表示します。
- ⑥あなたの運動特性
重心位置により、軸脚、得意な運動方向を割り出します。
- ⑦ワンポイント・アドバイス
測定結果による身体状態をもとにケガの予防やパフォーマンスアップに繋がるアドバイスをお伝えします。

Opti Canto® 装着方法

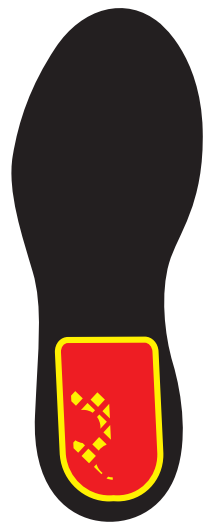

インソールを取り外します



Opti Canto を測定用紙の
「推奨オブティカント」
の通りシューズのカカト部分に
合わせます



インソールを戻し、シューズとイン
ソールで Opti Canto を挟むように
装着します



シューズを履いたら
2～3回足踏みをします



完了

交換時期

ご使用になられてからおよそ**1年**が交換の
目安です。ただし使用頻度や環境によつて
は変形・劣化が早くなる恐れがあります。
下図のような状態になってしまいましたら、
新しいものに交換されることをお勧め
致します。



取り扱い注意事項

- ◆ 足に痛みや身体に異常を感じたら、すぐにご使用をお止め下さい。
- ◆ オブティカントの色が落ち、色移りする場合がございます。靴下の中に入れる場合はご注意ください。
- ◆ 破損・変形したものをご使用にならないで下さい。
- ◆ 靴の形状により、オブティカントがずれる場合がございます。その際は、お買い求めの販売店までお問い合わせ下さい。
- ◆ 火など高温になる場所や直射日光を避け、涼しいところで保管して下さい。
- ◆ 重ねてオブティカントを装着される場合、必ず【BLUE】を一番下にお入れ下さい。効果が見込めない場合がございます。



最後に

ほとんどの身体の不調には

骨格バランスの崩れが関係しています。

人は骨格バランスが崩れることにより

身体が歪み、ストレスから気持ちのバランスまで

も崩れてしまいがちです。

Opti Canto は骨格バランスを修正することで

歪みを解消し、ストレスさえも軽減する

可能性を秘めています。

私たちは皆様に Opti Canto を使用し

楽しい生活を手に入れて欲しいと願っております。

Opti Canto を入れれば

いつも歩いている道も違った景色に見えるはず...

ちょっとだけ

新しい道へ

足を踏み出してみませんか？

殻を破ろう。Opti Canto で。